


## DrugWipe® Speicheltest

### Probenahme Speichel

(feuchte Zunge,  
Wangeninnenseiten – leicht  
abklopfen, wenn zu viel  
Speichel auf dem Wischvlies ist)




- 1 Probennehmer (blau)  
von Testkassette (weiß)  
abnehmen.

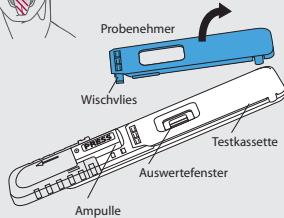

- 2 Bitten Sie den Probanden, die Zunge  
kreisförmig im Mund zu bewegen.  
Entnehmen Sie dann die Probe von  
der Zunge bzw. Wangeninnenseite  
durch 3-maliges Wischen.




- 3 Probennehmer wieder auf der  
**Testkassette einrasten**. Dabei  
ist ein Doppelklick hörbar.

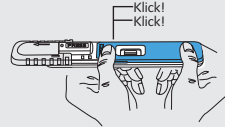


Ausreichend Speichel wurde gesammelt,  
wenn die Farbe der Wischvliese von  
rot zu gelb umschlägt.

- 4 Testkassette senkrecht halten und  
den Druckpunkt der Ampulle  
kräftig drücken. Das Zerbrechen  
der Ampulle ist deutlich zu hören.  
Testkassette für weitere  
**10-15 Sekunden senkrecht halten**.

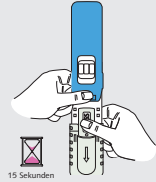


- 5 **Test auf waagerechte Fläche  
legen**. Nach 8 Minuten das  
Ergebnis auswerten. Test ist  
gültig, wenn sich alle Kontroll-  
linien (CL) rot färben. Test ist  
positiv, wenn sich eine oder  
mehrere Testlinien rot färben.

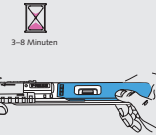


## DrugWipe® Oberflächen-/Schweißtest

### Probenahme Schweiß

(Stirn am Haaransatz,  
Nacken, hinter dem Ohr)

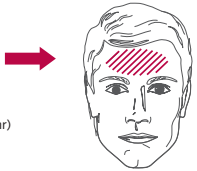

- 1 Probennehmer (blau)  
von Testkassette (weiß)  
abnehmen.

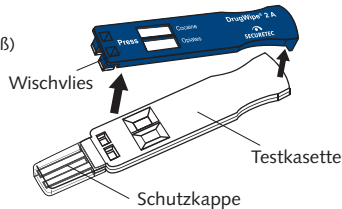


- 2 Wischvlies leicht anfeuchten.  
Überschüssiges Wasser  
abschütteln.




- 3 Probenahme mit leichtem  
Druck durchführen.




- 4 Probennehmer wieder auf der  
**Testkassette einrasten**. Dabei  
ist ein Doppelklick hörbar.

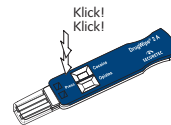


- 5 Schutzkappe abnehmen und  
**maximal bis zur  
Markierung** mit Wasser  
befüllen.

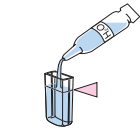

- 6 **Vorsicht:** Weißes Plastikgehä-  
use nicht mit eintauchen!  
Für 10-15 Sekunden den  
Teststreifen in die mit Wasser  
gefüllte Schutzkappe eintauchen.

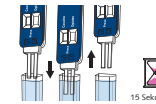


- 7 **Test auf waagerechte Fläche  
legen**. Nach 8 Minuten das  
Ergebnis auswerten. Test ist  
gültig, wenn sich alle Kontroll-  
linien (CL) rot färben. Test ist  
positiv, wenn sich eine oder  
mehrere Testlinien rot färben.

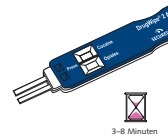

## Testergebnis

Erläuterungen am Beispiel DrugWipe® 5 S.  
Bitte stets aktuelle Testanleitung beachten.

### Test erfolgreich

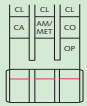


Kein Drogenkonsum  
(Rote Kontroll-Linie sichtbar)

### Test fehlerhaft




Fehlerursache:  
Test defekt oder  
falsche Handhabung


### Test erfolgreich: Drogenkonsum positiv

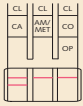


Cannabis

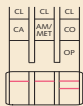


Kokain

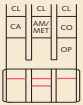

Ecstasy/  
Amphetamine



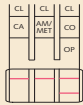


Heroin/Opiate

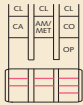

Cannabis, Kokain,  
Ecstasy/Amphetamine,  
Heroin/Opiate

## Nachweisfenster Cannabis (THC)

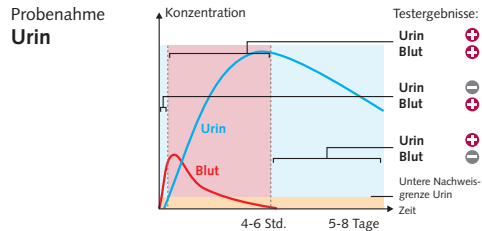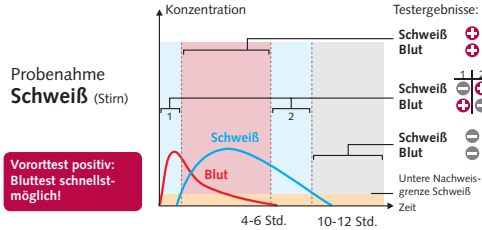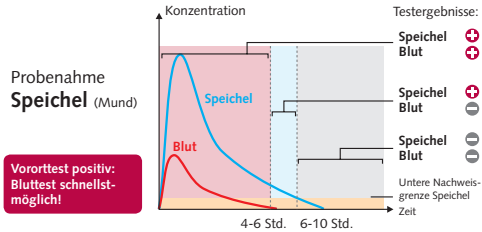

## Pupillenreaktion und Drogenkonsum

Drogenart	Pupillengröße	Reaktion
Cannabis	normal bis erweitert	normal bis verlangsamt (gerötete, glasige Augen)
Heroin/Opiate	verengt	kaum feststellbar
Kokain	erweitert	verlangsamt
Ecstasy/Amphetamine	erweitert	verlangsamt

