



DrugWipe® Speicheltest Kurzanleitung

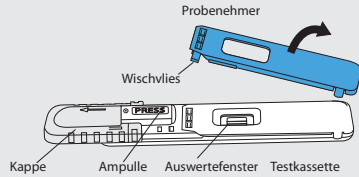


- 1 Kappe vollständig aufschieben. Blauen Probenehmer von der weißen Testkassette abnehmen. **Wischvlies nicht berühren.**

- 2 Testperson bitten, die Zunge 3 Mal kreisförmig im Mund zu bewegen. Speichel dann mittels Wischer von der Zunge o. der Wangeninnenseite abwischen. Leicht abklopfen, wenn zu viel Speichel auf dem Wischvlies ist.

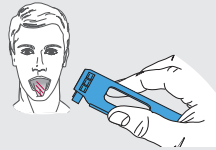


Farbumschlag der Wischvlies von rot zu gelb bestätigt eine erfolgreiche Probenahme.

- 3 Probenehmer wieder auf Testkassette setzen. **Wischer müssen mit hörbarem Doppelklick einrasten.**

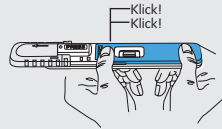


- 4 Testkassette mit der Ampulle nach unten halten. Mit dem Daumen kräftig auf PRESS drücken, bis die Ampulle zerbricht. Testkassette für weitere **10 Sekunden wie dargestellt halten.**

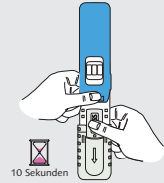

- 5 **Test auf eine waagerechte Fläche legen und nicht bewegen.** Test nach 5 Minuten auswerten. Test ist nur gültig, wenn sich alle Kontrolllinien (CL) rot färben. Test ist positiv, wenn sich eine oder mehrere Testlinien rot färben.



DrugWipe® Oberflächen-/Schweißtest Kurzanleitung

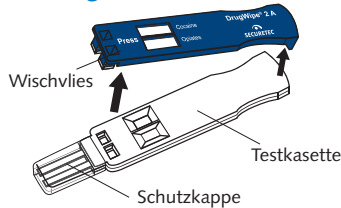


- 1 Blauen Probenehmer von der weißen Testkassette abnehmen. **Schutzkappe nicht abnehmen. Wischvliese nicht berühren.**

- 2 Nur bei Oberflächen/Schweiß Wischvlies leicht anfeuchten. Überschüssiges Wasser abschütteln.
- 3 Unter leichtem Druck die Oberflächen bzw. Haut ca. 5 bis 6 Mal abwischen. Sehr raue Flächen nur abtupfen.




- 4 Probenehmer wieder auf die Testkassette setzen. **Die Wischer müssen mit einem hörbaren Doppelklick einrasten.**

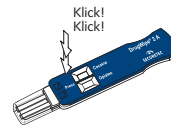


- 5 Schutzkappe abnehmen und maximal bis zur Markierung mit Wasser befüllen.

- 6 Schutzkappe entfernen und bis zur Markierung mit Wasser füllen. Teststreifen für 15 Sekunden eintauchen und wieder herausnehmen. **Weißes Plastikgehäuse dabei nicht eintauchen.**

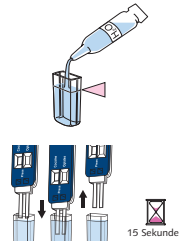

- 7 **Test auf waagerechte Fläche legen.** Nach 8 Minuten das Ergebnis auswerten. Test ist nur gültig, wenn sich alle Kontrolllinien (CL) rot färben. Test ist positiv, wenn sich eine oder mehrere Testlinien rot färben.

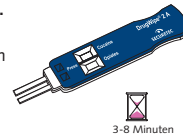

Testergebnis

Bitte stets aktuelle Gebrauchsanweisung beachten.
Erläuterungen am Beispiel DrugWipe® 5 S.

Test erfolgreich



Kein Drogenkonsum
(Rote Kontroll-Linie sichtbar)

Test fehlerhaft




Fehlerursache:
Test defekt oder
falsche Handhabung


Test erfolgreich: Drogenkonsum positiv




Cannabis

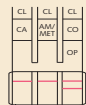


Kokain

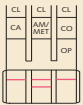

Ecstasy/
Amphetamine



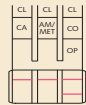


Heroin/Opiate

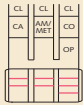

Cannabis, Kokain,
Ecstasy/Amphetamine,
Heroin/Opiate

Nachweisfenster Cannabis (THC)

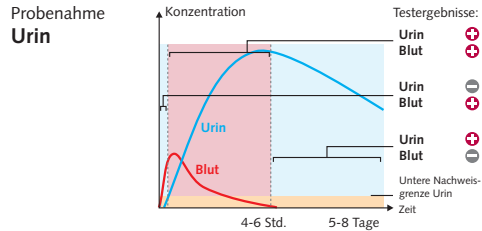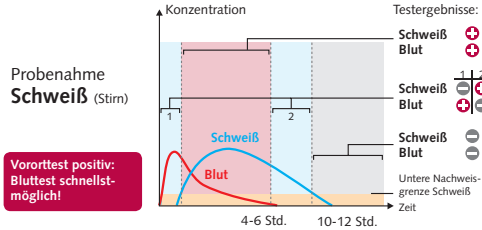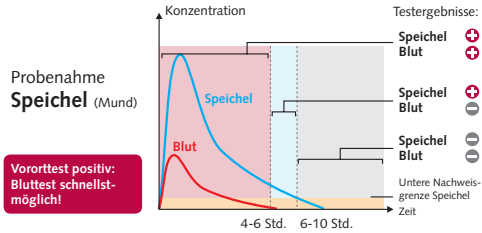

Pupillenreaktion und Drogenkonsum

Drogenart	Pupillengröße	Reaktion
Cannabis	normal bis erweitert	normal bis verlangsamt (gerötete, glasige Augen)
Heroin/Opiate	verengt	kaum feststellbar
Kokain	erweitert	verlangsamt
Ecstasy/Amphetamine	erweitert	verlangsamt

