

## LETTRE D'INFORMATION Mars 2017



### DrugWipe® 5 S a fait ses preuves auprès des services de police espagnols

Le test salivaire DrugWipe 5 S permet de détecter la consommation de cannabis avec une efficacité optimale : il détecte des concentrations en THC de 5 ng/ml, une quantité comparable à une cuillère à café de sucre dissoute dans une piscine olympique. Par rapport aux modèles précédents, ce test a gagné à la fois en rapidité et en sensibilité pour détecter les traces des substances psychoactives  $\Delta$  9-THC et 11-Hydroxy-THC. Un résultat définitif est désormais disponible en 5 minutes maximum, alors qu'il fallait compter 8 minutes avec les tests précédents.

Les services de police espagnols ont testé le DrugWipe 5 S lors de contrôles routiers tout au long du second semestre de l'année 2016. Nous disposons maintenant des résultats.

Il est particulièrement intéressant de tester le nouveau DrugWipe en Espagne ; en effet, les conditions légales sont propices à une étude à grande échelle du test salivaire rapide : la police espagnole est autorisée à exercer des contrôles préventifs en l'absence de soupçons. Pour exercer ces contrôles, certains lieux et certaines heures sont ciblés afin d'avoir un effet préventif et dissuasif. La devise étant « **Le contrôle de stupéfiants, partout et à tout moment** ». La stratégie de la police en Espagne repose sur un effet dissuasif produit par des contrôles pratiqués en l'absence de soupçons afin de réduire le danger que représente la consommation de drogues dans le cadre de la circulation routière.




## Rapidité et précision : les clés du succès

En évaluant l'efficacité du DrugWipe 5 S, les unités de police espagnoles visaient à réduire la durée des contrôles de stupéfiants et à optimiser leur efficacité. En cas de résultat positif, la durée de la procédure complète qui comprend la constitution du dossier et l'obtention d'éléments de preuve juridique ne doit pas dépasser 30 minutes ; cette procédure doit donc être d'autant plus efficace.

Les résultats du nouveau DrugWipe 5 S utilisé lors de contrôles routiers espagnols ont surpassé toutes les attentes. Dans la plupart des cas, les résultats positifs étaient déjà visibles au bout d'une ou de deux minutes ; dans un cas, le résultat était déjà visible au bout de 30 secondes.

Ce qu'il faut retenir : si un résultat positif est visible avant que les 5 minutes ne soient écoulées, alors il est valide. Il sera conservé et ne changera plus lors de la poursuite du test. Il pourra donc être immédiatement interprété comme résultat final du test.

Selon la législation espagnole en matière de contrôle de stupéfiants, un contrôle dont le résultat s'est avéré positif doit faire l'objet d'une confirmation par analyse d'un second prélèvement de salive réalisé en laboratoire. Il s'agit d'une analyse également effectuée sur un échantillon de salive et non de sang. Il est crucial que le test rapide soit précis et fiable car des faux positifs sont à l'origine de dépenses administratives et mobilisent des ressources inutiles. En effet, il ressort de l'étude de terrain que tous les échantillons identifiés comme positifs

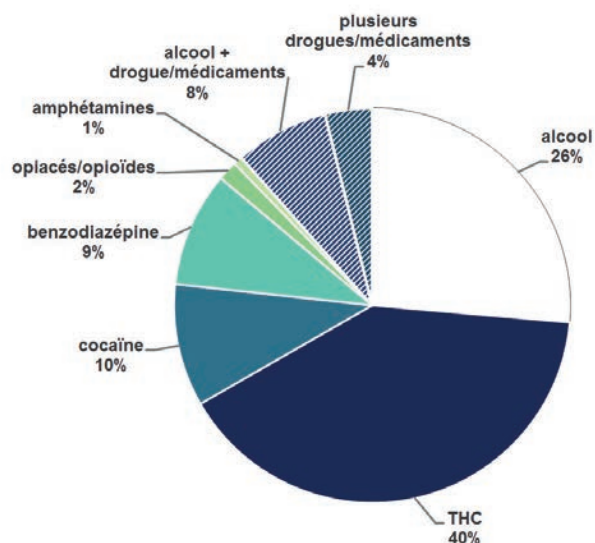

Usagers de la route testés positifs en Espagne, entre 2007 et 2009 : Dans 3 cas sur 4, la présence de drogues ou de médicaments a été détectée. Plus de 40 % des conducteurs testés positifs avaient consommé du cannabis. Source : étude DRUID

au THC par DrugWipe 5 S ont été confirmés positifs lors de l'analyse en laboratoire. Réciproquement, tous les conducteurs qui ont été testés négatifs au THC avec le DrugWipe 5 S ont également été testés négatifs lors de l'analyse effectuée en laboratoire. Le nouveau DrugWipe a donc affiché une sensibilité et une spécificité de 100 %. Grâce à la rapidité de DrugWipe et à la simplicité de la procédure probatoire par la salive, les services de police espagnols peuvent pratiquer des contrôles routiers fréquents et ainsi élargir leur visibilité et amplifier l'effet dissuasif. Les tests de dépistage de drogues sont à présent utilisés quotidiennement et ils sont facilement intégrés aux procédures habituelles.

## Avantages du nouveau DrugWipe® 5 S :

- Le temps nécessaire pour obtenir un résultat valide est plus court. Cela permet d'effectuer des contrôles plus rapides ou de réaliser plus de contrôles dans un même laps de temps. Le total des dépenses engagées dans les contrôles routiers diminue considérablement.
- La rapidité de la détection des résultats positifs valides facilite le contrôle de la situation par les agents de police.
- La haute précision et la grande fiabilité du test rapide limitent les dépenses liées aux faux positifs.

## DrugWipe® 5 S – Essayez-le et voyez par vous-même !



Securetec Detektions-Systeme AG  
Lilienthalstraße 7  
85579 Neubiberg  
Allemagne  
T +49 89 203080-1651  
F +49 89 203080-1652  
info@securetec.net  
www.securetec.net  
© 2017 Securetec Detektions-Systeme AG