


DrugWipe® test salivaire Mode d'emploi

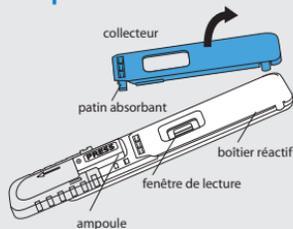


- 1 Faire glisser le capuchon dans le sens de la flèche jusqu'à l'apparition complète du mot PRESS. Retirer la spatule de prélèvement du boîtier réactif blanc. **Ne pas toucher les patins absorbants.**


- 2 Demander à la personne examinée de passer 3 fois la langue sur la paroi buccale en effectuant des mouvements circulaires. Passer ensuite l'éponge de prélèvement sur la langue ou à l'intérieur de la paroi buccale afin de prélever l'échantillon de salive. Le changement de couleur des patins absorbants passant du rouge au jaune indique que le prélèvement a été correctement effectué.



- 3 Replacer la spatule de prélèvement sur le boîtier réactif. **Un dé clic doit se faire entendre pour indiquer que les éponges de prélèvement sont correctement enclenchées.**

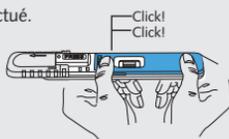


- 4 Placer le boîtier réactif en position verticale, l'ampoule vers le bas. Appuyer fortement avec le pouce sur le bouton PRESS jusqu'à ce que l'ampoule cède. Maintenir le boîtier réactif en position verticale durant encore **10 secondes comme indiqué.**

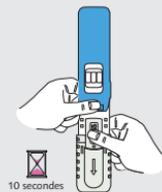

- 5 Placer le test sur une surface plane à l'horizontale et ne plus y toucher. Consulter le test au bout de 5 minutes. Le test n'est valable que si les lignes de contrôle (CL) se colorent en rouge. Le test est positif si une ou plusieurs ligne(s) réactive(s) vire(nt) au rouge.



DrugWipe® test surfaces / sueur Mode d'emploi

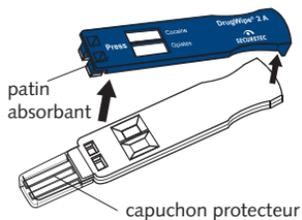

- 1 Retirer la spatule de prélèvement bleue du boîtier réactif blanc. **Ne pas retirer le capuchon. Ne pas toucher les patins absorbants.**

- 2 **Pour les prélèvements sur peau/sueur/surfaces :** Humidifier les patins absorbants de la spatule de prélèvement. Le reste d'eau peut être jeté.




- 3 Passer l'éponge de prélèvement sur la surface de prélèvement en exerçant une pression légère 5 ou 6 fois. Tamponner simplement les surfaces particulièrement rugueuses.




- 4 Replacer la spatule de prélèvement sur le boîtier réactif. **Un dé clic doit se faire entendre pour indiquer que les éponges de prélèvement sont correctement enclenchées.**



- 5 Retirer le capuchon et remplir d'eau jusqu'au repère.

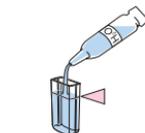

- 6 Immerger la bande réactive pendant 15 secondes puis la retirer. **Le boîtier de plastique blanc ne doit pas être immergé.**

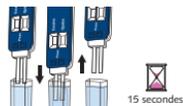

- 7 Placer le test sur une surface plane à l'horizontale et ne plus y toucher. Consulter le test au bout de 8 minutes. Le test n'est valable que si les lignes de contrôle (CL) se colorent en rouge. Le test est positif si une ou plusieurs ligne(s) réactive(s) vire(nt) au rouge.




Résultat du test

Pour obtenir une information plus détaillée, veuillez consulter le mode d'emploi.

(Test 5 drogues) dépistage en 8 minutes

Test valide

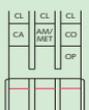


pas d'usage de stupéfiants
(ligne de contrôle rouge
bien visible)

Test invalide




origine de l'erreur:
test defectueux ou
mauvaise utilisation


Test valide : usage de stupéfiants

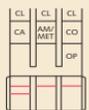


cannabis

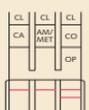


cocaïne

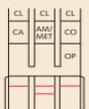

ecstasy/amphétamines

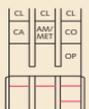


héroïne/opiacés

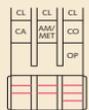

cannabis, cocaïne,
ecstasy/amphétamines,
héroïne/opiacés

Fenêtre de lecture cannabis (THC)

échantillon
salive (bouche)

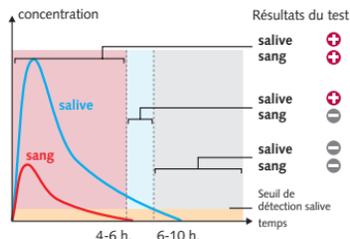

test de terrain positif:
confirmation par
contrôle sanguin au
plus vite!

Résultats du test


salive sang +

salive sang +

salive sang 0

salive sang 0

échantillon
sueur (front)

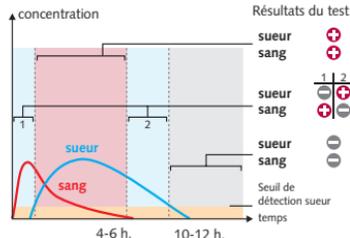

test de terrain positif:
confirmation par
contrôle sanguin au
plus vite!

Résultats du test:


sueur sang +

sueur sang 1 2

sueur sang 0

sueur sang 0

échantillon
urine

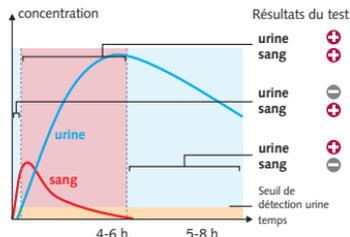

Résultats du test:

urine sang +

urine sang 0

urine sang +

urine sang 0

Réaction de la pupille et usage de stupéfiant

| Type de stupéfiant | Taille de la pupille | Réaction |
|----------------------|----------------------|---|
| cannabis | normale à dilatée | normale à ralentie (yeux rouges, vitreux) |
| héroïne/opiacés | rétrécie | à peine décelable |
| cocaïne | dilatée | ralentie |
| ecstasy/amphétamines | dilatée | ralentie |

